

VERMEIREN

Wartungshandbuch
Bewegungstrainer



WARTUNGSHANDBUCH

Bewegungstrainer

1. Pflege

Zum Reinigen verwenden Sie am besten eine Seifenlösung. Das Reinigungsmittel sollte in jedem Fall einen pH-Wert von min. 6 aufweisen. Verwenden Sie keine lösungsmittelhaltigen Reinigungsmittel. Beachten Sie die Hinweise der jeweiligen Pflegemittel. Zur Reinigung verwenden Sie bitte ein feuchtes Tuch und lauwarmes Wasser. Vermeiden Sie eine Durchnässung. Verwenden Sie keine Metallbürsten oder andere scharfkantige oder spitze Reinigungsutensilien. Bei Lackschäden wenden Sie sich an Ihren Fachhändler. Regelmäßige Pflege erhält Ihren Bewegungstrainer in einem einwandfreien und funktionstüchtigen Zustand.

2. Desinfektion

Durchführung der Desinfektion nur von einer Hygienefachkraft oder einer von der Hygienefachkraft eingewiesenen Person. Die Scheuerdesinfektion ist nur mit den Desinfektionsmittellösungen und deren Gebrauchsverdünnungen zu verwenden, die in den Empfehlungen des Robert-Koch-Institutes (www.rki.de) aufgeführt sind.

3. Reparatur / Wartung / Inspektion

Die Lebenszeit des Bewegungstrainers hängt ab von der Art der Nutzung, der Einlagerung, regelmäßigen Kontrollen, Service und Pflege. Verwenden Sie ausschließlich VERMEIREN-Originalersatzteile. Reparaturen, Instandsetzungen dürfen nur von geschultem Personal durchgeführt werden. Nutzen Sie die Serviceleistungen Ihres Fachhändlers. Er wird Ihnen bei Wartung und Reparatur gerne weiterhelfen.

Um Ihren Bewegungstrainer funktionstechnisch zu halten, sollten Sie folgende Hinweise beachten:

Grundsätzlich soll Ihr Bewegungstrainer jährlich (jedoch immer vor jedem Wiedereinsatz) gründlich einer Inspektion bei Ihrem Fachhändler unterzogen werden, wobei folgende Kriterien geprüft werden:

- Vollständigkeit
- Einstellungsmechanismus der Trittwiderstandes
- Rahmen (Verformung, Standsicherheit, Verschraubungen)
- Entfernung von Verschmutzungen
- **Lackschäden (mögliche Roststellen entfernen und lackieren)**

Alle 8 Wochen:

- Fettung (Bewegliche Verbindungen sollen gefettet sein)

Alle 6 Monate (und vor jedem Wiedereinsatz) sollte der Bewegungstrainer überprüft werden nach folgenden Kriterien:

- Allgemeine Durchsicht
- Desinfektion (nur bei Wiedereinsatz)

4. Verpackung und Lagerung

Bei der Verpackung und Lagerung des Bewegungstrainers sind die folgenden Hinweise zu beachten:

- Lagern Sie den Bewegungstrainer nur bei Temperaturen von +5°C bis +41°C).
- Einlagerung bei Luftfeuchtigkeit von 30 % à 70 %.
- Achten Sie darauf, den Bewegungstrainer ausreichend abzudecken oder zu verpacken, um ihn vor Rost und Fremdkörpern zu schützen (z.B. Salzwasser, Seeluft, Sand, Staub).
- Alle Bauteile müssen belastungsfrei gelagert werden (legen Sie keine schweren Teile auf den Bewegungstrainer, klemmen Sie den Bewegungstrainer nicht zwischen anderen Teilen ein usw.).

5. Garantie

Auszug aus den allgemeinen Geschäftsbedingungen:

(...)

5. Die Verjährungsfrist für Gewährleistungsansprüche beträgt 24 Monate.

(...)

Wir übernehmen keine Gewähr bei Schäden durch konstruktive Veränderungen an unseren Produkten, mangelnde Wartung, fehlerhafte oder unsachgemäße Behandlung oder Lagerung. Schäden aufgrund natürlicher Abnutzung unterliegen ebenfalls nicht der Gewährleistung.

6. Entsorgung

Wenden Sie sich zur Entsorgung des Bewegungstrainers an Ihr lokales Recyclingcenter oder geben Sie das Produkt an den Fachhändler zurück. Dieser wird den Bewegungstrainer nach einer fachgerechten Reinigung bzw. Desinfektion an den Hersteller zurücksenden, der den Bewegungstrainer entsorgt bzw. recycelt.

Die Verpackungsmaterialien können Sie entweder in das Recycling geben oder bei Ihrem Fachhändler abgeben.