

# User manual

MANUEL D'UTILISATION  
GEBRUIKSAANWIJZING  
GEBRAUCHSANWEISUNG  
MANUALE DI ISTRUZIONI  
MANUAL DE INSTRUCCIONES  
INSTRUKCJA OBSŁUGI  
NÁVOD K OBSLUZE

## Mia



## Toilettensitzerhöhung Mia

Vielen Dank für Ihr Vertrauen in Produkte von Vermeiren. Dieses Handbuch soll Ihnen bei der Benutzung dieses Toilettensitzerhöhungs helfen. Lesen Sie es daher bitte aufmerksam durch. Sollten Sie nach der Lektüre dieses Handbuchs noch Fragen haben, können Sie sich jederzeit an Ihren Fachhändler wenden. Auf unserer Webseite [www.vermeiren.com](http://www.vermeiren.com) finden Sie stets die aktuellste Version der folgenden Informationen. Informieren Sie sich bitte regelmäßig auf dieser Website nach eventuell verfügbaren Aktualisierungen. Sehbehinderte Menschen können sich die elektronische Version dieses Handbuchs herunterladen und mit Hilfe einer Sprachsyntheselösung („Text-to-Speech-Software“) vorlesen lassen.

### 1 Bei Lieferung

Packen Sie Ihr Produkt aus und kontrollieren Sie, ob die Lieferung vollständig ist. Die folgenden Teile sind im Lieferumfang enthalten:

- 1 Toilettensitzerhöhung inkl. Abdeckung
- 2 Sitzbreitenversteller
- Optional: Sitzkissen
- Handbuch

Prüfen Sie die Sendung sorgfältig auf Transportschäden. Sollten Sie nach der Auslieferung Schäden feststellen, wenden Sie sich an den Frachtführer.

### 2 Montage und Verwendung des Toilettensitzerhöhungs



VORSICHT

Verletzungsgefahr

- Stellen Sie vor jedem Gebrauch sicher, dass der Toilettensitz sicher an der Toilette montiert ist.
- Um sicherzustellen, dass der Toilettensitz ordnungsgemäß sitzt, lösen Sie die Breitereinstellungen einmal pro Woche und ziehen Sie sie wieder fest.
- Überschreiten Sie nicht das maximale Benutzergewicht.

Indikationen und Kontraindikationen: Die Toilettensitzerhöhung dient Ihnen dazu, durch eine komfortablere Sitzhöhe die Nutzung Ihrer Toilette zu erleichtern, z. B. im Falle von: Funktionsstörungen der unteren Gliedmaßen aufgrund eingeschränkter oder fehlender Gelenkbeweglichkeit, verminderter


Muskelkraft in den unteren Gliedmaßen, Schäden an der Lendenwirbelsäule, Schäden am Nervensystem,... Ziel der Versorgung ist die Ermöglichung der selbstständigen oder selbstständigeren Toilettennutzung. Bei bestimmungsgemäßem Gebrauch dieses Produkts sind keine Kontraindikationen bekannt.

Mia ist in 2 Sitzhöhen erhältlich: 10 cm oder 15 cm.

Das max. Benutzergewicht beträgt 225 KG.

Installation Mia:

1. Heben Sie den Toilettendeckel und den Sitz an. Entfernen Sie gegebenenfalls den Deckel und den Sitz.
2. Setzen Sie die Breitenversteller (1) auf den erhöhten Toilettensitz. Drehen Sie den Sternknopf im Uhrzeigersinn um die Breite etwas zu verringern.
3. Setzen Sie den erhöhten Toilettensitz mit der Vorderlippe (2) nach außen auf den Toilettenrand [A].
4. Schieben Sie den angehobenen Toilettensitz so weit wie möglich nach hinten [B].
5. Die Breitereinsteller (1) von Hand festziehen.

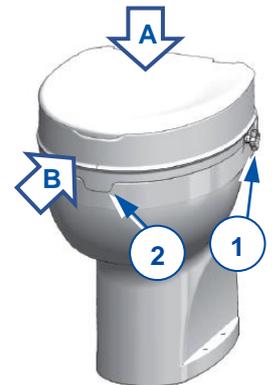

Entfernen Sie den erhöhten Sitzbezug um das optionale Kissen zu platzieren.

Setzen Sie sich langsam auf die Toilettensitzerhöhung, indem Sie Ihre Ellbogen, Hüfte und Knie beugen. Halten Sie sich beim Hinsetzen / Aufstehen nicht am erhöhten Sitz fest.

### 3 Wartung

Ihr Toilettensitzerhöhung besteht aus Kunststoffkomponenten. Zur Reinigung des Toilettensitzerhöhungs Mia sind nur handelsübliche Haushaltsreiniger zu nutzen. Vermeiden Sie aggressive Reiniger, da sonst Verfärbungen auftreten können.

#### 3.1 Erwartete Lebensdauer

Die Toilettensitzerhöhung ist für eine durchschnittliche Lebensdauer von 5 Jahren ausgelegt.

## 4 Technische Daten

**DE**

<b>Hersteller</b>	<b>Vermeiren</b>
<b>Typ</b>	<b>Toilettensitzerhöhung</b>
<b>Modell</b>	<b>Mia</b>

<b>Beschreibung</b>	<b>Abmessungen</b>
Maximale Last	225 kg
Sitzbreitenverstellung	100 mm 150 mm
Breite	365 mm
Länge	405 mm
Temperaturbereich für Lagerung	+5°C - +41°C

Technische Änderungen behalten wir uns vor.  
Messtoleranz von  $\pm 15$  mm / 1,5 kg / 1,5 °



Vermeiren GROUP  
Vermeirenplein 1 / 15  
2920 Kalmthout  
BE

website: [www.vermeiren.com](http://www.vermeiren.com)

## Hinweise für den Fachhändler

Diese Gebrauchsanweisung ist Bestandteil des Produkts und ist bei jeder Produktauslieferung auszuhandigen.

Version: B, 2022-07

Basic UDI: 5415174 120903Mia GW

**Alle Rechte, auch an der Übersetzung, vorbehalten.**