

VERMEIREN

Wartungshandbuch
Unterarmkrücken



WARTUNGSANWEISUNG

Unterarmkrücken

1. Pflege

Zum Reinigen verwenden Sie am besten eine Seifenlösung. Das Reinigungsmittel sollte in jedem Fall einen pH-Wert von min. 6 aufweisen. Verwenden Sie keine lösungsmittelhaltigen Reinigungsmittel. Beachten Sie die Hinweise der jeweiligen Desinfektionsmittel. Zur Reinigung verwenden Sie bitte ein feuchtes Tuch und lauwarmes Wasser. Vermeiden Sie eine Durchnässung. Verwenden Sie keine Metallbürsten oder andere scharfkantige oder spitze Reinigungsutensilien. Bei Lackschäden wenden Sie sich an Ihren Fachhändler. Regelmäßige Pflege erhält Ihr Produkt in einem einwandfreien und funktionstüchtigen Zustand.

2. Desinfektion

Desinfektionen dürfen nur durch Hygienefachkräfte oder von diesen geschulten Personen vorgenommen werden. Wenden Sie sich an Ihren Fachhändler. Zur Desinfektion verwenden Sie nur Desinfektionsmittel, die für die Behandlung von lackierten Metalloberflächen geeignet sind. Beachten Sie die Hinweise der jeweiligen Desinfektionsmittel. Verwenden Sie nur validierte Verfahren (Scheuerdesinfektion) und Desinfektionsmittel nach den Angaben des Robert-Koch-Institutes (Info über: www.rki.de).

3. Reparatur / Wartung / Inspektion

Die Lebenszeit der Unterarmkrücke hängt ab von der Art der Nutzung, der Einlagerung, regelmäßigen Kontrollen, Service und Pflege.

Verwenden Sie ausschließlich VERMEIREN-Originalersatzteile. Reparaturen, Instandsetzungen dürfen nur von geschultem Personal durchgeführt werden. Nutzen Sie die Serviceleistungen Ihres Fachhändlers. Er wird Ihnen bei Wartung und Reparatur gerne weiterhelfen.

Vor jedem Wiedereinsatz ist der Unterarmkrücke zu warten, wobei folgende Kriterien geprüft werden:

- Vollständigkeit
- Höhenanpassung
- Rahmen (Verformung, Standsicherheit, Verschraubungen)
- **Lackschäden (mögliche Roststellen entfernen und lackieren) und prüfen Sie auf Korrosion oder Beschädigung des Federstifts.**

Alle 8 Wochen:

- Drehen Sie die Spitze (Gummiaufsatz) um eine Vierteldrehung. Dadurch wird die Abnutzung einer bestimmten Stelle verringert. Überprüfen Sie den Zustand der Spitze und tauschen Sie sie gegebenenfalls aus.

Alle 6 Monate (und vor jedem Wiedereinsatz) sollte der Unterarmkrücke gewartet werden nach folgenden Kriterien:

- Allgemeine Inspektion
- Reinigung
- Desinfektion (vor Wiedereinsatz)

4. Verpackung und Lagerung

Der Versand und die Lagerung der Unterarmkrücke müssen gemäß den folgenden Anweisungen erfolgen:

- Nur in trockenen Räumen lagern (zwischen +5°C und +41°C).
- Einlagerung bei Luftfeuchtigkeit von 30 % bis 70 %.
- Achten Sie darauf, das Produkt ausreichend abzudecken oder zu verpacken, um es vor Rost und Fremdkörpern zu schützen (z. B. Salzwasser, Seeluft, Sand und Staub).
- Das Produkt muss belastungsfrei gelagert werden. (legen Sie keine schweren Teile auf das Produkt, klemmen Sie es nicht zwischen anderen Gegenständen ein usw.).

5. Gewährleistung

Auszug aus den allgemeinen Geschäftsbedingungen:

(...)

5. Die Verjährungsfrist für Gewährleistungsansprüche beträgt 24 Monate.

(...)

Wir übernehmen keine Gewähr bei Schäden, die durch konstruktive Veränderungen an unseren Produkten, mangelnde Wartung, fehlerhafte oder unsachgemäße Behandlung oder Lagerung oder Verwendung von anderen als Original-Ersatzteilen entstanden sind.

Die Gewährleistung auf Verschleißteile bzw. auf Teile, die einer natürlichen Abnutzung unterliegen, wird ebenfalls ausgeschlossen.

6. Entsorgung

Wenden Sie sich zur Entsorgung der Unterarmkrücke an Ihr lokales Recyclingcenter, oder geben Sie das Produkt an den Fachhändler zurück. Dieser wird die Unterarmkrücke nach einer fachgerechten Reinigung bzw. Desinfektion an den Hersteller zurücksenden, der diese entsorgt bzw. recycelt.

Die Verpackungsmaterialien können Sie entweder zum Recycling geben oder bei Ihrem Fachhändler lassen.