

### BERICHTIGUNG BEZÜGLICH DES LADEVORGANGS

Gehen Sie zum Aufladen der Akkus in Ihrem Scooter **AUSSCHLIEßLICH** nach diesen Anweisungen vor. Der Originaltext zum Aufladen der Scooter-Akkus in der Bedienungsanleitung verfällt.

Diese Berichtigung ist Teil der Bedienungsanleitung für Scooter.

Wir empfehlen Ihnen dringend, diese Anleitung aufmerksam zu lesen. Wenn Sie Fragen hierzu haben sollten, kontaktieren Sie bitte Ihren Fachhändler. Er wird Ihnen gerne behilflich sein.

## Sicherheitshinweise



### WARNUNG

Gefahr von Personen- und Sachschäden durch Feuer

- Benutzen Sie nur das Ladegerät und den/die Akku(s), die mit Ihrem Produkt mitgeliefert wurden. Die Benutzung eines anderen Akkus oder Ladegeräts kann gefährlich sein (Brandgefahr). Wenden Sie sich wegen möglicher Ersatzteile an Ihren Fachhändler.
- Akku, Ladegerät, Kabel und Stecker sollten von Ihnen unter keinen Umständen geöffnet oder modifiziert werden! An den Anschlusspunkten dürfen ebenfalls keine Veränderungen vorgenommen werden!
- Das Ladegerät ist nur dafür vorgesehen, den/die mit dem Scooter mitgelieferten Akku(s) aufzuladen, keine anderen Akkus.
- Schützen Sie den Akku und das Ladegerät vor offenem Feuer, hohen Temperaturen (>50°C), Feuchtigkeit, Sonneneinstrahlung und starken Erschütterungen (z. B. Sturz). Benutzen Sie den Akku NICHT, wenn eine dieser Bedingungen vorliegt.
- Laden Sie den Akku mit Hilfe des mitgelieferten Ladegeräts in einem gut belüfteten Gebäudebereich außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
- Benutzen Sie zum Aufladen kein Verlängerungskabel.



### ACHTUNG

Verletzungsgefahr

Die Akkus halten je nach Gebrauch, Gelände und Fahrumständen kürzer oder länger.

Wenn Sie einen Ausflug planen, berücksichtigen Sie bitte den Ladezustand der Akkus. Beachten Sie den Aktionsradius des Akkus; die technischen Details finden Sie in der Bedienungsanleitung.

### ACHTUNG

Gefahr einer Beschädigung des Akkus



## und/oder Verringerung der Akkulebensdauer

- Lesen Sie sich die Bedienungsanleitung für das Ladegerät aufmerksam durch und beachten Sie die Sicherheitshinweise hierzu.
- Wenn Ihr Scooter eine Weile nicht benutzt wird, empfiehlt es sich, den Akku regelmäßig aufzuladen (ca. einmal im Monat).
- Unterbrechen Sie den Ladevorgang nicht; warten Sie, bis das Ladegerät anzeigt, dass der Akku vollständig aufgeladen ist. Näheres hierzu finden Sie in der Bedienungsanleitung für das Ladegerät. Vermeiden Sie das Aufladen in kurzen Zeiträumen. Hinweis: Dies gilt NICHT für Lithium-Akkus.
- Der Akku kann irreversibel beschädigt werden, wenn er vollständig entladen wird. Achten Sie deshalb darauf, den Akku rechtzeitig wieder aufzuladen:
  - Bei intensiver Nutzung (lange Strecken, täglicher Gebrauch): Nach gebrauch sofort wieder aufladen. Unterbrechen Sie den Ladevorgang nicht.
  - Mit durchschnittlicher Nutzung (Kurze Strecken, täglich oder mehrmals pro Woche): Laden Sie, wenn die Batterieanzeige 50% Entladung anzeigt. Unterbrechen Sie den Ladevorgang nicht.
  - Mit geringer Nutzung oder Lagerung: Einmal pro Woche aufladen. Unterbrechen Sie den Ladevorgang nicht.
- Die Lebensdauer verkürzt sich, wenn der Akku längere Zeit extremer Kälte ausgesetzt wird; siehe auch die technischen Details in der Bedienungsanleitung.
- Achten Sie darauf, dass alle Anschlusspunkte am Akku sowie der Anschlusspunkt am Akkugehäuse frei von Staub und anderen Verunreinigungen sind.
- Schützen Sie den Akku vor starken Quellen elektromagnetischer Strahlung.



## Anleitung zum Aufladen des Akkus

1. Schalten Sie den Scooter AUS.
2. Schließen Sie ZUERST das Akku-Ladegerät an eine Steckdose mit 230 V Wechselstrom an.
3. Verbinden Sie das Ladegerät mit dem Akku.
4. Eine Erläuterung der Anzeigen auf dem Ladegerät finden Sie in dem Handbuch für das Akku-Ladegerät.
5. Wenn der Akku vollständig aufgeladen ist, trennen Sie den Akku vom Ladegerät.
6. Trennen Sie das Ladegerät von der Steckdose ab, lassen Sie es abkühlen, und lagern Sie es dann an einem trockenen Ort.
7. Schalten Sie den Scooter EIN und überprüfen Sie, ob alle LEDs der Akkustatusanzeige leuchten.

**i** Sollte sich der Akku nicht gemäß den nachstehenden Anweisungen in der Bedienungsanleitung für das Ladegerät aufladen lassen, wenden Sie sich bitte an Ihren Fachhändler.

Wenn die Bedienkonsole nach dem Aufladen den Fehlercode „Antrieb blockiert“ anzeigt, vergewissern Sie sich, dass das Akku-Ladegerät getrennt ist. Diese Sicherheitsmaßnahme verhindert, dass Sie mit dem Scooter fahren, solange das Ladegerät noch mit dem Stromnetz verbunden ist.

